

Hinweis zum FellmineralSCREEN

Wie entnehme ich die Fellprobe richtig?

Es werden **0,5g Fell benötigt**. Das entspricht etwa **1-2 gut gehäuften EBLöffeln**. Wird weniger Fell eingesandt wird die Untersuchung *ohne* Rücksprache des Labors auf die Elemente beschränkt die zuverlässig zu testen sind.

Das **Fell bitte entlang der Körperhaut abschneiden**.

Bitte entnehme das Fell entweder **am Hals oder Nacken** - generell an Stellen wo wenig geleckt wird.

Die Länge des abgeschnittenen Fells ist nicht ausschlaggebend. Sollte aber in langer Zeitraum überprüft werden, ist längeres Fell von Vorteil.




Die Fellprobe bitte **nie** vor dem Versand waschen.

Bei **Pferden** bitte **keine Mähne oder Schweifhaare** einsenden.

Bitte sei achtsam beim abschneiden des Fells.

Bitte kein Fell rausrupfen, das schmerzt!

Entnahmestellen:

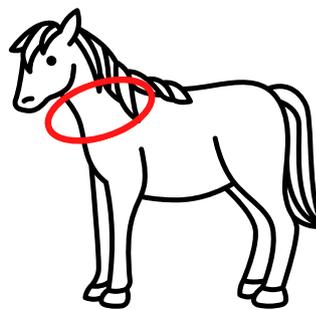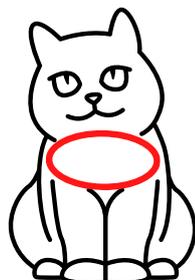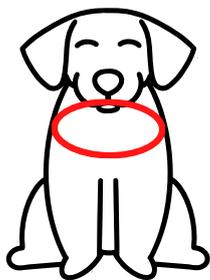

Nina Jeckel
Tierheilpraktikerin, Bioenergietherapeutin, Seelenflüsterin,
Coach & Mentorin
Wolfer Str. 14, 63654 Büdingen
Telefon: +49 (0) 151-68419107
mail@ninajeckel.de